


Bedienungsanleitung/ Garantie

Gebruiksaanwijzing/ Garantie • Mode d'emploi/ Garantie Instrucciones de servicio/ Garantia • Manual de instrucoes/ Garantia • Istruzioni per l'uso/ Garanzia • Інструкція з експлуатації/ Гарантія • Instruction Manual/ Guarantee • Instrukcja obsługi/ Gwarancja • Navod k použití/Zaruka • Hasznalati utasítás/ Garancia • Руководство по эксплуатации/Гарантия

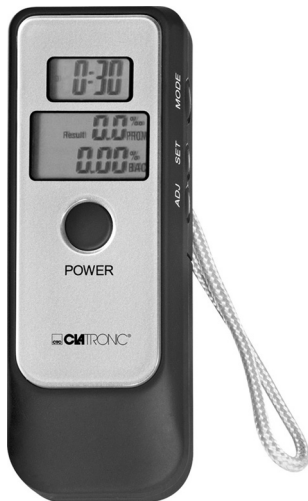

Alkoholtester

Alcoholtester • Alcootest • Alcoholímetro • Teste de Álcool
Alcolímetro • Алкотестер • Alcohol Tester • Alkomat
Tester alkoholu • Alkoholszonda • Алкотестер

AT 3260

Umístění ovladačů

1 LCD hodiny	2 LCD displej testeru alkoholu
3 Tlačítko POWER	4 Náustek
5 Tlačítko MODE	6 Tlačítko SET
7 Tlačítko ADJ	8 Prostor pro baterii
9 Tlačítko RESET	

Bezpečnostní pokyny


- Tento produkt byl navržen k podpoře odpovědného řízení motorových vozidel a ovládání strojů.
- Varování: Každý člověk reaguje na alkohol jinak. Někdo může být ovlivněn alkoholem již v počátcích. Odpovědnost při řízení vozidla/stroje tak leží na vás.
- Tento výrobek nebyl navržen jako průvodce správnou konzumací. Ani z něj nelze vyvozovat úroveň alkoholu v krvi či vaši schopnost řízení vozidla.
- Tímto zařízením nelze adekvátně zaznamenat hodnotu hladiny alkoholu v krvi, která dle místního nařízení ve vaší zemi omezuje schopnost řízení vozidla.
- **Proto se společnost Clatronic International Ltd. zříká jakékoliv odpovědnosti v těchto kontroverzních případech.**
- **V případě pochybností neseďte za volant.**

Vlastnosti


- Dvojitý LCD displej
- Digitální tester alkoholu s akustickým signálem
- Rozsah měření: 0,00 – 1,90 promile (PPM)
- rychlé měření s rychlým výsledkem
- Automatické vypínání
- Funkce hodin/budíku
- Zobrazení teploty
- Funkce odpočítávání
- Baterie testeru alkoholu: 2x AAA ●UM-4 ● Alkalické R03
- Baterie hodin: knoflíková baterie 1x 1.5V LR 44

CZ

Vložení baterií

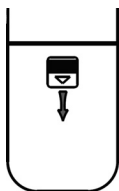

- Sejměte kryt baterie na zadní straně zařízení.
- Pro napájení testeru alkoholu vložte 2 baterie typu AAA • UM-4 • R03
- Dbejte na správnou polaritu! Postup vkládání je zobrazen na přístroji.

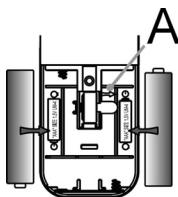

- Knoflíková baterie 1,5 V, napájející hodiny je již vložena.
- Je zabezpečena fólií.
- Odstraňte fólii (A) a aktivujte knoflíkovou baterii 1,5 V.

Ovládání



Na co byste měli dbát před samotným testováním.

- Alkohol může po nějakou dobu přetrvávat v ústech, musíte jej nejprve nechat vyprchat.
- Po vašem posledním alkoholickém nápoji musíte počkat s měřením nejméně 20 minut.
- 20 minut před měřením nekuřte ani nepijte.
- Nevkládejte do úst ani žádné bonbóny proti kašli či peprmintové kapky, které mohou ovlivnit výsledek.
- Pro potvrzení výsledku můžete test opakovat. Před opětovným měřením však vyčkejte 3 minuty.
- Nepoužívejte těkavé látky, jako jsou laky, rozpouštědla, pesticidy atd.

CZ

Zahřívání

- Jednou stiskněte tlačítko POWER. Ozve se zvukový signál.
- Na displeji se zobrazí symbol „WARM UP“ (zahřívání) a začne odpočet od 10 do 0. Tester alkoholu se zahřívá.

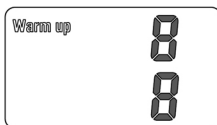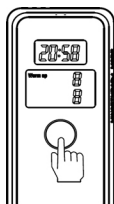

i Poznámka:

Před prvním použitím či po delší prodlevě: Tester potřebuje několikrát vyčistit a zahřát snímač. Opakovaně stiskněte tlačítko POWER a vyčkejte, až proběhne zahřívací proces.

Testování

1. Po úspěšné zahřívací fázi se na displeji zobrazí „BLOW“ (foukejte). Zařízení je připraveno k testování. Začne odpočet od 10.




2. Foukejte do náustku po dobu 3-5 sekund.
3. Zazní zvukový signál. Výslednou hodnotu si můžete přečíst na displeji.
4. Pokud je obsah alkoholu v rozmezí 0,2 až 0,5 promile (PPM) zobrazí se na displeji symbol CAUTION.



CZ

5. Pokud obsah alkoholu přesahuje hodnotu 0,5 promile, na displeji se zobrazí symbol DANGER. V současné době zazní hlasitý zvukový signál.
6. Pokud do náustku neproudí žádný vzduch, pokud je přístroj v testovacím režimu, zobrazí se na testeru "0.00".

Automatické vypínání

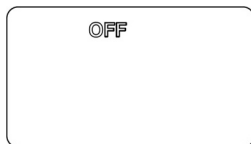


- Výsledek se zobrazí na 15 vteřin a následně se displej vypne do režimu "OFF".
- Tester se vypne za 2 až 3 sekundy.

Symbol baterie "L"

- Jakmile se zobrazí na displeji symbol "L", jsou baterie vybité.
- Tester se automaticky vypne.
- Vyměňte baterie za dvě shodné nové baterie.
- Vždy vyměňujte obě baterie!

Nastavení hodin

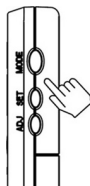

Nastavení času ⌚

1. Opakovaným stiskem tlačítka MODE přejdete do nastavení hodin.
2. Na 2 sekundy stiskněte a přidržte tlačítko SET. Rozblikají se číslice určující hodinu.
3. Stiskem tlačítka ADJ nastavíte hodinu.

CZ

4. Stiskněte tlačítko SET. Rozblikají se číslice určující minuty.
5. Stiskem tlačítka ADJ nastavíte minuty.
6. Pak stiskněte tlačítko SET a nastavení potvrďte.

Režim zobrazení času 12 či 24 hodin

Opakovaným stiskem tlačítka ADJ přepněte režim zobrazení času z 12 hodinového na 24 hodinový.

Budík

1. Opakovaným stiskem tlačítka MODE získáte přístup k režimu budíku.
2. Na 2 sekundy stiskněte a přidržte tlačítko SET. Rozblikají se číslice určující hodinu.
3. Stiskem tlačítka ADJ nastavíte hodinu.
4. Stiskněte tlačítko SET. Rozblikají se číslice určující minuty.
5. Stiskem tlačítka ADJ nastavíte minuty.
6. Nakonec stiskněte tlačítko SET a nastavení potvrďte.
7. Stiskem tlačítka ADJ budík zapnete či vypnete. Pokud bude budík zapnut, zobrazí se symbol .


Teplota

1. Opakovaným stiskem tlačítka MODE získáte přístup k režimu teploměru.
2. Stiskem tlačítka ADJ zvolte zobrazení stupňů Fahrenheita či Celsia.

Odpočítávání

1. Opakovaným stiskem tlačítka MODE získáte přístup k režimu odpočítávání.
2. Na 2 sekundy stiskněte a přidržte tlačítko SET. Rozblikají se číslice určující hodinu.
3. Stiskem tlačítka ADJ nastavíte hodinu.
4. Stiskněte tlačítko SET. Rozblikají se číslice určující minuty.
5. Stiskem tlačítka ADJ nastavíte minuty.
6. Pak stiskněte tlačítko SET a nastavení potvrďte.
7. Stiskem tlačítka ADJ začnete odpočítávání, nebo jej ukončíte. Jakmile odpočítávání skončí, zazní zvukový signál.

Resetování hodin / Výměna baterií

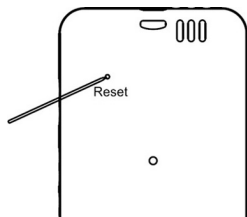

- Pokud chcete přístroj nastavit do výchozího výrobního nastavení, stiskněte ostrým předmětem tlačítko RESET na boku přístroje.
- Jakmile začne slábnout zobrazení displeje, vyměňte knoflíkovou baterii LR44.

CZ

Údržba a čištění

- Na čištění testeru nepoužívejte chemikálie, jako je benzín, rozpouštědla či petrolejová éter.
- Přístroj setřete pouze lehce navlhčeným hadříkem.
- Nefoukejte do náustku tekutiny.
- Neskladujte zařízení v místnosti s kontaminovaným vzduchem.
- Tester neupravujte, můžete způsobit jeho poruchu.

Technická data

- Snímač: Testuje alkoholové výpary
- Měřicí rozsah: 0,00‰ – 1,9‰ promile (PPM)
- Přesnost: +/- 0,1 promile (PPM)
- Napájení testeru alkoholu: 2x 1.5V baterie typu AAA • UM-4 • R03
- Napájení hodin: knoflíková baterie 1x 1,5V LR44
- Doba provozu: Zahřívání: 10 sekund, výsledek po: <5 sekundách
- Odchyłka času hodin: +/- 2 sekundy/den
- Rozměry: V 100 x Š 37 x D 17 mm

Nakládání s bateriemi



Vaše zařízení obsahuje baterie. Jakmile jsou baterie vybité, postupujte takto:



Upozornění

- ▶ Vybité baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!
- ▶ Jako uživatel jste ze zákona povinen vrátit vybité baterie / akumulátory.

CZ

- Baterie musí být z přístroje vyjmuty.
- Vybité baterie můžete zdarma vrátit do obchodu, kde jste je zakoupili.
- Informace o sběrně starých baterií získáte na Vašem obecním úřadě.

Ochrana životního prostředí



Na konci životnosti nevyhazujte přístroj do domovního odpadu. Zanešte jej do místního sběrného dvora k ekologické likvidaci. Tím pomůžete chránit životní prostředí.